

criotilo[®] sport

Spray para crioanestesia local en piel intacta

Ingredientes: isopentano, n-butano, i-butano, propano, mentol.

PROPIEDADES:

CRIOTILO SPORT es un producto para uso cutáneo. Al pulverizar la solución sobre la piel se consigue un fuerte descenso de la temperatura que proporciona una anestesia local en la zona (efecto crioanestésico local).

INDICACIONES:

Crioanestesia local:

- en medicina deportiva para atenuar el dolor mediante frío,
- previa a técnicas invasivas rápidas e intervenciones quirúrgicas menores. Aplicar sobre la piel intacta antes de venopunción, canulación venosa y cirugía superficial dermatológica.

MODO DE EMPLEO:

CRIOTILO SPORT es para uso cutáneo exclusivamente externo sobre la piel intacta.

Para su aplicación coger el frasco con una mano, presionar el pulsador con un dedo y pulverizar la zona que se desea anestésiar, manteniendo el frasco a unos 15 cm de distancia. Realizar varias pulverizaciones de 3-5 segundos hasta conseguir el efecto deseado, que se manifiesta por el aspecto blanco y endurecido de la piel.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS:

Puede aparecer irritación en las membranas mucosas. Puede darse casos de sensibilización cutánea.

Intoxicación y su tratamiento

En caso de inhalación accidental masiva, Criotilo Sport puede causar somnolencia y mareos.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO:

Úsese únicamente como se indica. Evítese la inhalación directa. Solución para la pulverización de uso externo. No debe ser ingerido. Debe evitarse el contacto con los ojos u otras mucosas. El uso abusivo puede provocar quemaduras en la piel por congelación.

No utilice **CRIOILO SPORT** si,

- es alérgico a cualquier componente de la solución,
- tiene la piel herida o infectada.

Aerosol extremadamente inflamable. Envase a presión. Puede reventar si se calienta.

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después del uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C. Mantener fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN:

Estuche conteniendo un frasco de 100 ml.

FABRICANTE:

LABORATORIOS ERN, S.A.
Perú 228, 08020 Barcelona, España.

Si desea obtener más información sobre CRIOILO SPORT contacte mediante correo electrónico a: info@ern.es

Fecha de publicación de la última revisión de las instrucciones de uso: Marzo 2019.

 Fabricante

 Fecha de caducidad

 Código de lote

 50°C

Límite superior de temperatura



Consúltense las instrucciones de uso

ERN

CE₀₁₂₀

40382/00