

Fixodental

**POLVO ADHESIVO PARA
PRÓTESIS DENTALES**

COMPOSICIÓN

Goma karaya (99,20 %) y otros excipientes.

PROPIEDADES

Formulada a base de Goma karaya, un polvo soluble en agua, totalmente insípido, inodoro y con una excelente capacidad adhesiva.

MODO DE EMPLEO

1. Lavar la dentadura y, sin secarla, espolvorear con Fixodental Polvo aquellas partes que están en contacto con la mucosa bucal.
2. Proceder a colocarla en su posición, ejerciendo cierta presión para facilitar la adherencia al paladar o encía.

La fijación es máxima transcurridos algunos minutos. Fixodental Polvo es prácticamente inocuo y puede utilizarse cuantas veces sea preciso.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No utilizar si el envase está dañado.

No utilizar el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Después de usar, depositar en el contenedor de residuos apropiado.

Mantener fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIONES

Estuche conteniendo un frasco de 17 g o 50 g.

FABRICANTE

LABORATORIOS ERN, S.A.

Perú, 228 – 08020 Barcelona, España

Fecha de publicación de la última revisión de las instrucciones de uso: Enero 2021

En caso de incidente grave informe al fabricante y a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).



Fabricante



Fecha de caducidad



Código de lote



Consúltense las instrucciones de uso



No utilizar si el envase está dañado

CE

ERN

3171/04