

# Solución Fisiológica VITULIA

## Unidosis

65NOT2159/B

### **INDICACIONES:**

La Solución Fisiológica VITULIA está recomendada para el lavado de las fosas nasales y el lavado ocular diario, la higiene de los ojos y nariz del bebé, niño o adulto.

Uso nasal: La Solución Fisiológica VITULIA facilita la limpieza de la nariz de los bebés que frecuentemente está obstruida por mucosidades. Favorece la eliminación de las secreciones excesivas. Gracias a su acción humidificante, soluciona rápidamente la sequedad nasal del adulto.

Uso oftálmico: La Solución Fisiológica VITULIA puede ser usada para la higiene ocular del bebé por instilación, baños o aplicación del producto en una gasa estéril.

La solución fisiológica puede ser utilizada por el niño o el adulto.

### **COMPOSICIÓN:**

Cloruro sódico: 0,9 g

Agua purificada csp 100 ml.

### **OBSERVACIONES:**

La Solución Fisiológica VITULIA puede ser utilizada tan a menudo como sea necesario, sin riesgo por el uso en largos periodos de tiempo.

En caso de tratamiento con un medicamento de administración nasal u oftálmica, debe utilizarse la solución fisiológica antes de su aplicación y no después.

### **MODO DE EMPLEO:**

Separar un envase unidosis y abrir girando su parte superior.

Uso nasal: Introducir la punta del envase unidosis en la fosa nasal, con la cabeza ligeramente inclinada y presionar con cuidado el envase. Después sonarse la nariz o utilizar un aspirador nasal para bebé.

En recién nacidos, instilar el producto con el mínimo de presión con el fin de evitar el riesgo de contaminación en el oído medio.





Uso oftálmico: Empapar un algodón y limpiar suavemente los párpados del bebé o verter unas gotas en el ojo y limpiar con la ayuda de una gasa estéril. En el caso del adulto, el producto puede ser utilizado como instilación, lavado o baños oculares.

### **PRECAUCIONES DE EMPLEO:**

Producto de un solo uso.

No inyectar.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No utilizar después de la fecha de caducidad.

No utilizar el mismo envase unidosis para la higiene de la nariz y de los ojos.

Almacenar a temperatura ambiente.

Los envases unidosis abiertos no deben ser reutilizados, ya que el producto no contiene conservantes.

Este producto sanitario no lleva conservante, su reutilización implicaría el riesgo de administrar una solución contaminada.

Fabricante:

**Laboratoire UNITHER**

Espace Industriel Nord

151 rue André Durouchez

CS 28028

80084 Amiens Cedex 2 - France

Fabricado en Francia.

Distribuido por:

**LABORATORIOS ERN, S.A.**

Perú, 228

08020 Barcelona, España



El certificado CE fue obtenido el 25/08/2000.  
Fecha de revisión de las instrucciones de uso: Noviembre 2012.

---

**LABORATORIOS ERN, S.A.**

Perú, 228 - 08020 Barcelona. España