

RYM® Plata

Spray

Indicaciones

Tratamiento de lesiones de la piel no infectadas (abrasiones, rozaduras, piel agrietada, cortes, pequeñas heridas quirúrgicas, quemaduras localizadas de primer y segundo grado), en pie diabético, pie de atleta y úlceras por presión.

Cómo actúa

RYM® Plata es una suspensión en spray para uso tópico que contiene ácido hialurónico (HA), plata metálica y vitamina E. El ácido hialurónico y la plata se combinan en una matriz (caolín y almidón) con propiedades absorbentes. La absorción del exudado crea un entorno que facilita el proceso de regeneración del tejido natural, formando, junto con el HA y la plata, una barrera protectora contra la penetración de microbios. La acción formadora de película de la vitamina E, al ayudar al proceso de reepitelización, favorece la restauración de las condiciones óptimas de hidratación de la piel.

Dosis y modo de empleo

- 1) Lavar las lesiones antes de aplicar el spray.
- 2) Agitar bien el recipiente durante unos segundos antes de usarlo.
- 3) Sosteniendo el recipiente en posición vertical, rocíe una cantidad de polvo suficiente para cubrir la superficie a tratar desde una distancia de unos 15 cm.
- 4) Recomendamos que la zona donde se ha aplicado el producto se cubra con una gasa estéril.
- 5) Aplicar una o dos veces al día, de acuerdo con la condición clínica.
- 6) El producto se elimina fácilmente lavando la lesión con solución salina.

Advertencias

Uso externo: no tragar ni inhalar.

Evite el contacto con los ojos. Si se produce contacto, enjuague con abundante agua.

Evite exponer el área tratada a la luz solar.

Evite el contacto directo del dispensador del spray con la herida.

En caso de reacción adversa, suspenda el uso del producto y consulte a su médico.

Consulte a su médico para el uso prolongado.

Cerrar el envase después de su uso.

No usar si el envase está dañado o después de la fecha de caducidad.

Composición

Componente principal: 0,25 % de ácido hialurónico (sal sódica).

Otros componentes: plata metálica, caolín, almidón de maíz, vitamina E, aceite de salvado de arroz, terpeneol, disiloxano y propelente.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes. No se conocen síntomas de sobredosis. No se conocen interacciones con medicamentos o productos medicinales. Las mujeres embarazadas deben consultar a su médico antes de usar el producto.

Conservación

Conservar a una temperatura entre + 5 °C y + 30 °C.

Peligro: Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: puede reventar si se calienta. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C / 122 ° F. Mantener fuera del alcance de los niños.



El número de lote y la fecha de caducidad se indican en la parte inferior del envase.

La fecha de caducidad se refiere al producto en buen estado correctamente almacenado.

No contiene gases propulsores que agoten el ozono.

Después del uso, deséchelo de acuerdo con las normativas locales vigentes.

Fabricante

Nirial Pharma srl

via Rovani, 7

20123 Milán (Italia)

www.nirialpharma.com

Distribuido en España por:

LABORATORIOS ERN, S.A.

Perú, 228

08020 Barcelona, España



Fecha de la última revisión de las instrucciones de uso: Septiembre 2021.

Rev.B



Consúltense las instrucciones de uso



Manténgase fuera de la luz del sol



Fecha de caducidad



Manténgase seco



Código de lote



Por favor, deséchelo cuidadosamente después de su uso



Número de catálogo



Fabricante



Límite de temperatura



Peligro aerosol extremadamente inflamable